



Loxo Art.-Nr.: 938 698/A
Code: 368103
Tiefe: 1,00 mm
Länge: 2,50 mm

CE0050

BD QuikHeel™


Sicherheitsinzisionslanzetten für die kapillare Blutabnahme an der Ferse bei Neugeborenen, Säuglingen und Frühgeborenen



Loxo Art.-Nr.: 938 697/B
Code: 368102
Tiefe: 0,85 mm
Länge: 1,75 mm

CE0050

Kurzanleitung

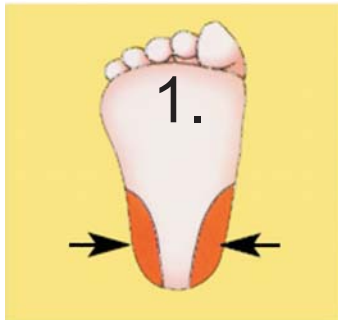

QuikHeel™ und Säugling für die Entnahme der Blutprobe vorbereiten. Eine geeignete Entnahmestelle für die Fersenpunktion (siehe Pfeile roter Bereich) auswählen, desinfizieren und trocknen lassen. Eventuell ausgewählte Punktionsstelle zur Verbesserung des Blutflusses vorher wärmen.



QuikHeel™ zwischen Daumen und Mittelfinger halten und in die gewünschte Position bringen. Überprüfen, ob QuikHeel™ mit der gesamten Auflagefläche leicht auf der Haut aufliegt (nicht stark anpressen!), dann mit dem Zeigefinger den Auslöseknopf drücken.



Auslöseknopf und Klinge verbleiben danach im Instrumentengehäuse. Nach der Durchführung QuikHeel™ sofort von der Ferse des Kleinkindes entfernen und in einem geeigneten Behältnis entsorgen.

Keine hämolytischen Proben



ausreichende Blutmenge für z.B. PKU



keine schreienden Säuglinge



Kostenreduktion



Schmerzreduktion



Zeitersparnis



kein Quetschen



keine Wiederholungen

Grenzen der Methode und Beeinträchtigungen der Blutabnahme:

- Jede ödematöse Stelle, sowie eine Stelle früherer Wunden innerhalb von 2 mm meiden
- Schlechte Durchblutung kann zu ungenügendem Blutfluß führen
- Hautirritation durch zu starkes anpressen des Schneideinstruments an die Ferse, kann zu tiefen und gefährlichen Wunden führen
- Die Arbeitsanleitung genau beachten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Erwärmen der Ferse auf 42 - 44 °C verbessert den Blutfluß; Temperaturen über 44°C können zu Verbrennungen führen.

Bestellungen/Informationen: Telefon 06221 - 86 80 23

LOXO GmbH, Immunbiologie-Biochemie, Produkte und Systeme, Postfach 1130, 69215 Dossenheim
Tel.: 06221 86 80 23 Fax: 06221 86 80255 e-mail: info@loxo.de Internet: http://www.loxo.de